

Safe
1.0 mL

Español




UNITRACT[®]
Passive Sharps Protection

Jeringas de 1 ml con aguja retráctil


Guía de consulta rápida Instrucciones de uso

- 1** A. Retire la tapa de la jeringa.
B. Empuje el émbolo para expulsar el exceso de aire de la jeringa.

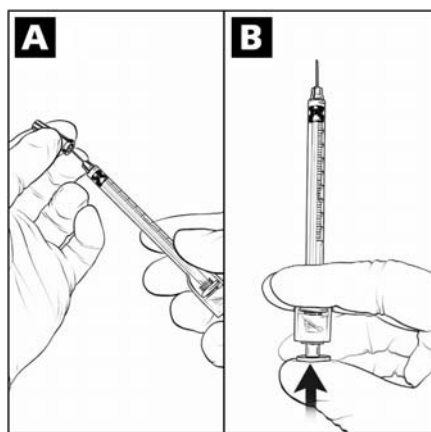


I. Prepare y administre las inyecciones en condiciones asépticas siguiendo las instrucciones de un profesional sanitario o del programa de intercambio de jeringas.

- 2** A. Cargue la dosis necesaria.
B. Ponga el émbolo más allá de la marca de 0,8 ml.^{II}

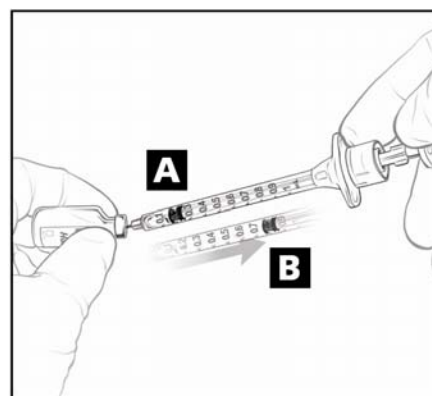


II. Para comenzar la inyección, para dosis de menos de 0,8 ml, asegúrese de que retira el émbolo más allá de la marca de 0,8 ml.

- 3** A. Expulse el exceso de aire o de líquido.
B. Inserte la aguja y presione el émbolo para administrar la dosis completa,^{III} haciendo que la aguja pase por cualquier resistencia desde donde está introducida la aguja.^{IV}

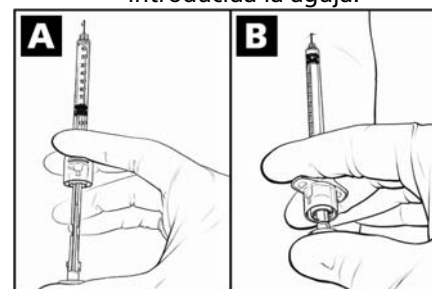

- III. Esta jeringa presenta una característica de prevención de reutilización por pestañas: una vez que se empuja el émbolo más allá de la marca de 0,5 ml, la jeringa no se podrá volver a cargar, aunque permite la aspiración y muestra de sangre entre cada una de las pestañas.
IV. El usuario debe notar y oír la activación del mecanismo de retracción automática de la aguja. Siga empujando el émbolo hasta que alcance la marca de cero.

- 4** A. El usuario puede controlar la velocidad de retracción automática de la aguja directamente desde el cuerpo.^V
B. Deseche la jeringa de forma segura.^{VI}

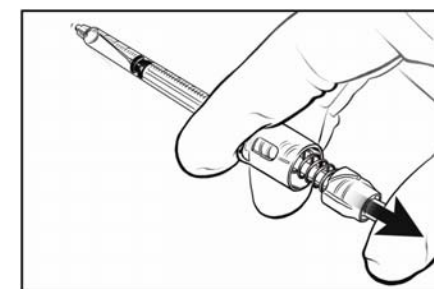

- V. Ajustando la presión que el pulgar y el dedo ejercen sobre el émbolo.
VI. Después de usarla, deséchela en un envase para objetos afilados aprobado o devuélvala a las instalaciones de intercambio de agujas.