

**Insulin
U-100
1,0 mL**

Español




UNITRACT  [®]
Passive Sharps Protection

Jeringas Insulin de 1 mL
con aguja retráctil


Guía de consulta rápida

Instrucciones para presurizar una ampolla

1 Retire la tapa de la jeringa y aspire el aire (10 unidades más que la dosis necesaria).

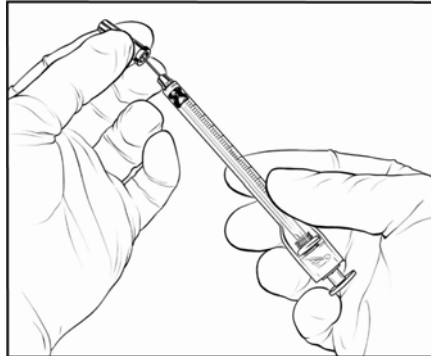


2 A. Inyecte el aire en la ampolla, pero no empuje el émbolo más allá de la marca de 10 unidades.^I
B. Cargue la dosis necesaria, asegúrese siempre de que pone el émbolo más allá de la marca de 20 unidades.^{II}

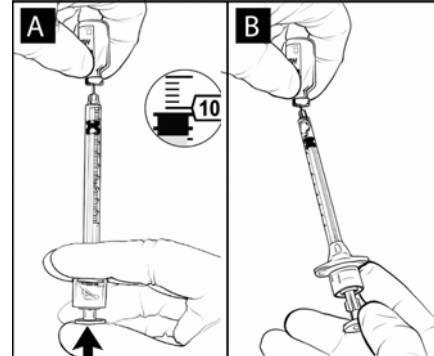


I. Para evitar la contracción prematura de la aguja, no empuje el émbolo más allá de la marca de 10 unidades.
II. Para comenzar la inyección, para dosis de menos de 20 unidades, asegúrese de que retira el émbolo más allá de la marca de 20 unidades.

3 A. Expulse todo exceso de aire o de líquido.^{III}
B. Inserte la aguja^{IV} y presione el émbolo para administrar la dosis completa, haciendo que la aguja pase por cualquier resistencia desde donde está introducida la aguja.^V

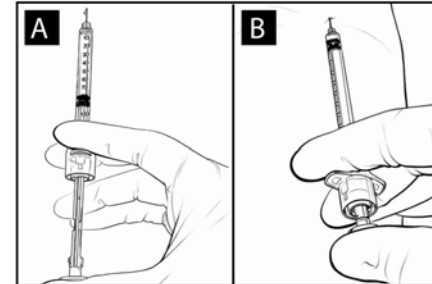

III. Los pacientes que mezclen dos tipos de insulina no deben cambiar el orden ni el proceso de la mezcla.
IV. Prepare y administre las inyecciones en condiciones asépticas conforme a las regulaciones institucionales o a las instrucciones de un profesional sanitario.
V. El usuario debe notar y oír la activación del mecanismo de retracción automática de la aguja. Siga empujando el émbolo hasta que alcance la marca de cero.

4 El usuario puede controlar la velocidad de retracción automática de la aguja^{VI} directamente desde el cuerpo.^{VII}

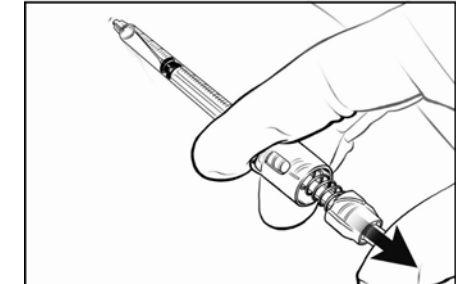

VI. Ajustando la presión que el pulgar y el dedo ejercen sobre el émbolo.
VII. Después de usarla, deséchela en un envase para objetos afilados aprobado.

UNILIFE  [™]
medical solutions

Unilife Medical Solutions es una empresa con certificación ISO 13485 que desarrolla y suministra innovadores dispositivos de seguridad.

Para obtener las instrucciones de uso completas, visite www.unitract.com

