

**Insulin
U-100
1,0 mL**

Français




UNI TRACT  [®]™
Passive Sharps Protection

1ml Seringues à insuline
avec aiguille rétractable


Guide de référence rapide
Consignes pour l'utilisation
d'une cartouche ou d'une ampoule

- 1** A. Retirez le capuchon.
B. Enfoncez le piston pour expulser l'excès d'air.^I

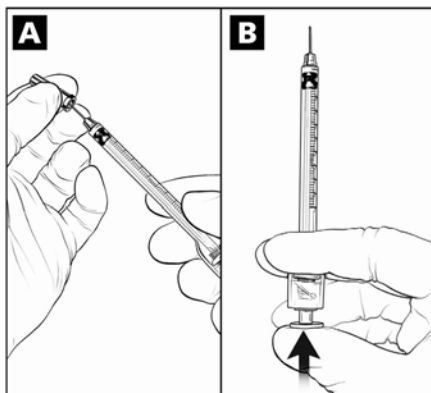


I. Les patients qui mélangent deux types d'insuline ne doivent pas modifier l'ordre ni la procédure de mélange.

- 2** A. Aspirez la dose requise—veuillez à toujours tirer le piston au-delà de la marque des 20 unités.^{II}
B. Expulsez l'excès d'air ou de fluide.^{III}

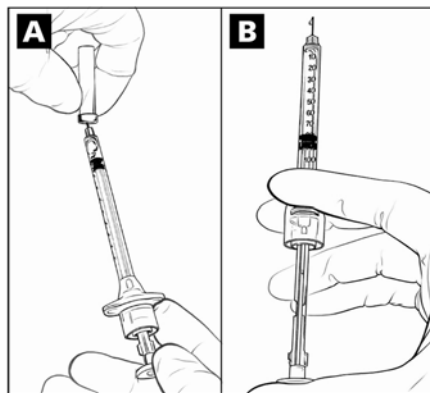


- II. Afin de déclencher l'injection, le piston doit être tiré au-delà de la marque des 20 unités.
III. Préparez et administrez les injections conformément à la technique aseptique de votre établissement ou aux instructions de votre professionnel de la santé.

- 3** Introduisez l'aiguille dans le site d'injection et appuyez à fond sur le piston, au-delà de toute résistance provoquée par l'engagement de l'aiguille, jusqu'à ce que la dose complète ait été injectée.^{IV}

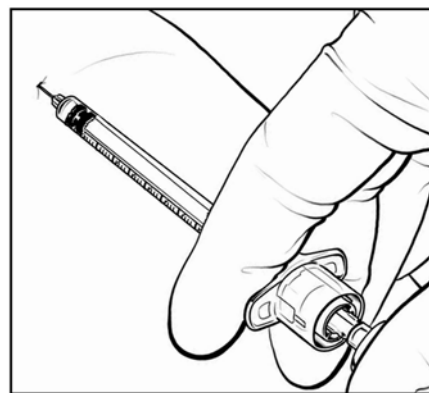

- IV. Les opérateurs doivent ressentir et entendre l'enclenchement du mécanisme de rétraction automatique de l'aiguille. Une pression doit être exercée sur le piston jusqu'à ce qu'il atteigne la marque du zéro.

- 4** La vitesse de rétraction automatique de l'aiguille peut être contrôlée^V directement à partir du point d'injection.^{VI}

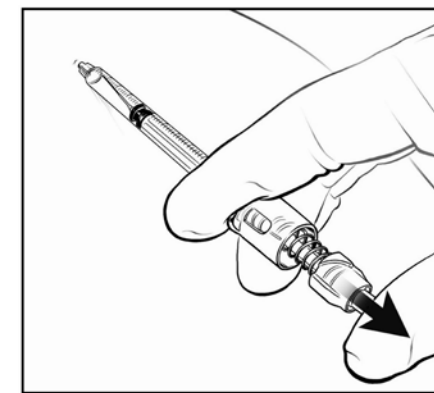

- V. En ajustant la pression digitale sur le piston.
VI. Jetez la seringue utilisée dans un réceptacle de sécurité pour objets tranchants.

