

**Insulin
U-100
1,0 mL**

Deutsch




UNI TRACT  [®]™
Passive Sharps Protection

1 ml Insulinspritzen mit Nadelrückzug

Kurzanleitung


Anweisungen zum Gebrauch der Ampulle und Kartusche

- 1** A. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
B. Drücken Sie den Stempel herunter, um überschüssige Luft zu verdrängen.^I

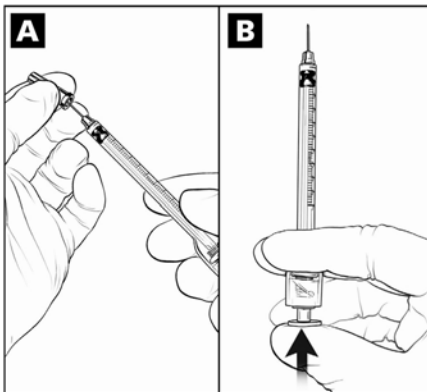


I. Patienten, die eine Mischung aus zwei Insulinarten verwenden, sollten Mischreihenfolge und Mischverfahren nicht verändern.

- 2** A. Ziehen Sie die erforderliche Dosis auf. Stellen Sie sicher, dass der Stempel immer bis über die 20-Einheiten-Markierung gezogen wird.^{II}
B. Verdrängen Sie überschüssige Luft oder Flüssigkeiten.^{III}

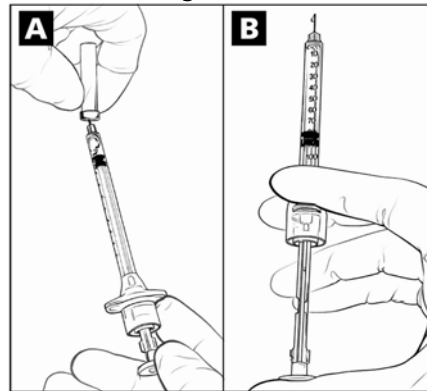


- II. Um mit der Injektion zu beginnen, stellen Sie bei einer Dosis von unter 20 Einheiten sicher, dass der Stempel bis über die 20-Einheiten-Markierung gezogen wird.
III. Injektionen müssen nach dem vorgegebenen aseptischen Verfahren der jeweiligen Einrichtung bzw. gemäß den Anweisungen Ihres Arztes vorbereitet und verabreicht werden.

- 3** Führen Sie die Nadel ein, und drücken Sie den Stempel gegen den Nadelwiderstand vollständig herunter, um die gesamte Dosis auszutreiben.^{IV}

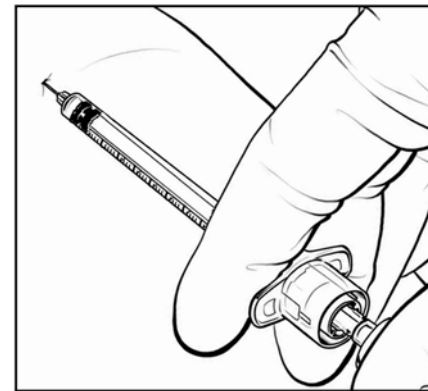

IV. Der Benutzer sollte die Aktivierung des automatischen Nadelrückzugsmechanismus fühlen und hören.

- 4** Der Benutzer kann die Geschwindigkeit des automatischen Nadelrückzugs^V aus dem Körper direkt steuern.^{VI}

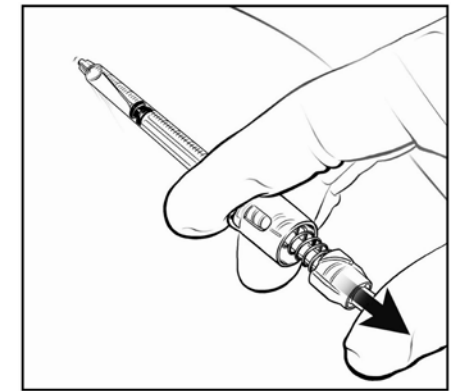

- V. Der Stempel muss mithilfe des Drucks von Daumen und Finger bis zur Null-Markierung heruntergedrückt werden.
VI. Nach Gebrauch muss die Spritze in einem geprüften durchstichsicheren Abwurfbehälter entsorgt werden.

