

**Insulin  
U-100  
1.0 mL**

**Español**




**UNI TRACT**  <sup>®</sup>TM  
Passive Sharps Protection

**Jeringas Insulin de 1 mL**  
con aguja retráctil


**Guía de consulta rápida**  
**Instrucciones de uso del  
cartucho o ampolla**

- 1** A. Retire la tapa de la jeringa.  
B. Empuje el émbolo para expulsar el exceso de aire de la jeringa.<sup>I</sup>

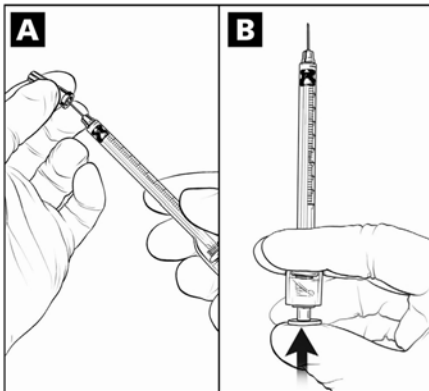


I. Los pacientes que mezclen dos tipos de insulina no deben cambiar el orden ni el proceso de la mezcla.

- 2** A. Cargue la dosis necesaria, asegúrese siempre de que pone el émbolo más allá de la marca de 20 unidades.<sup>II</sup>  
B. Expulse todo exceso de aire o de líquido.<sup>III</sup>

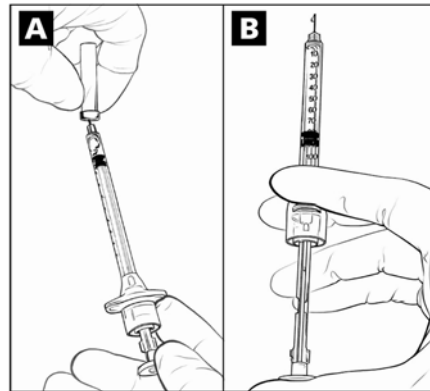


- II. Para comenzar la inyección, para dosis de menos de 20 unidades, asegúrese de que retira el émbolo más allá de la marca de 20 unidades.  
III. Prepare y administre las inyecciones en condiciones asépticas conforme a las regulaciones institucionales o a las instrucciones de un profesional sanitario.

- 3** Inserte la aguja y presione el émbolo para administrar la dosis completa, haciendo que la aguja pase por cualquier resistencia desde donde está introducida la aguja.<sup>IV</sup>

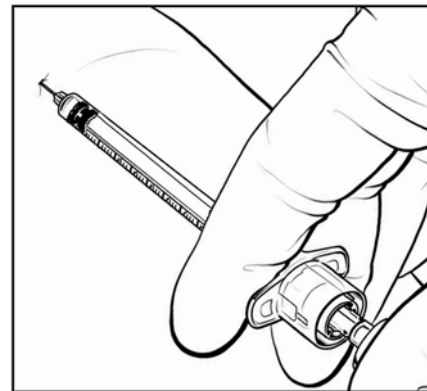

IV. El usuario debe notar y oír la activación del mecanismo de retracción automática de la aguja. Siga empujando el émbolo hasta que alcance la marca de cero.

- 4** El usuario puede controlar la velocidad de retracción automática de la aguja<sup>V</sup> directamente desde el cuerpo.<sup>VI</sup>

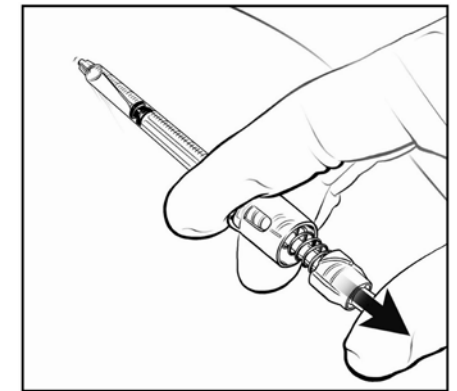

V. Ajustando la presión que el pulgar y el dedo ejercen sobre el émbolo.  
VI. Después de usarla, deséchela en un envase para objetos afilados aprobado.

**UNILIFE**  <sup>TM</sup>  
medical solutions

Unilife Medical Solutions es una empresa con certificación ISO 13485 que desarrolla y suministra innovadores dispositivos de seguridad.

Para obtener las instrucciones de uso completas, visite [www.unitract.com](http://www.unitract.com)

