

**Insulin
U-100
1,0 mL**

Italiano




UNI TRACT  ^{®TM}
Passive Sharps Protection

Siringhe per insulina da 1 mL con ago retrattile

Guida rapida di consultazione


Istruzioni per l'uso di cartuccia o ampolla

- 1** A. Togliere il tappo.
B. Premere lo stantuffo in modo da eliminare l'aria in eccesso.^I

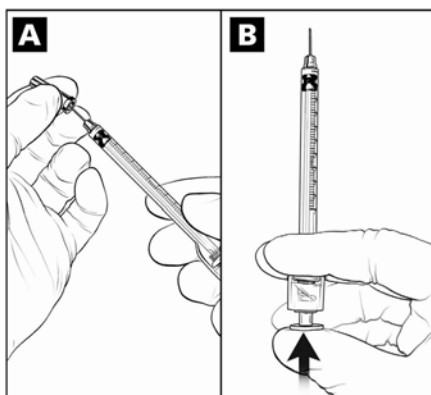


I. I pazienti che miselano due tipi di insulina non devono modificare l'ordine o il processo di miscelatura.

- 2** A. Attingere la dose richiesta – ritrarre sempre lo stantuffo fino a superare la tacca delle 20 unità.^{II}
B. Espellere l'eventuale aria o fluido in eccesso.^{III}

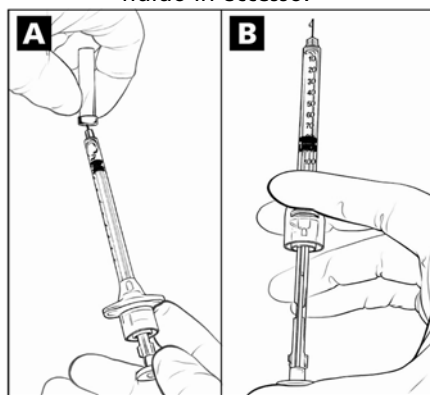


II. Per avviare l'iniezione – per dosi di meno di 20 unità, assicurarsi che lo stantuffo sia reintrodotto oltre la tacca delle 20 unità.
III. Preparare e praticare sempre le iniezioni utilizzando la tecnica asettica in uso presso la struttura di appartenenza o prescritta da un operatore sanitario.

- 3** Inserire l'ago e iniettare l'intera dose premendo fino in fondo lo stantuffo, superando la resistenza dovuta all'innesto dell'ago.^{IV}

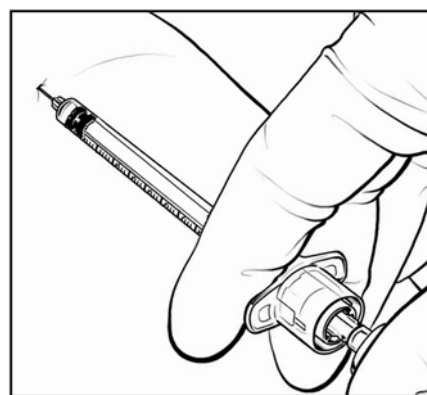

IV. Gli operatori dovrebbero avvertire e udire l'attivazione del meccanismo automatico di ritrazione. Lo stantuffo va spinto finché raggiunge la tacca dello zero.

- 4** Gli operatori hanno la possibilità di controllare la rapidità della ritrazione automatica dell'ago^V direttamente dal corpo.^{VI}

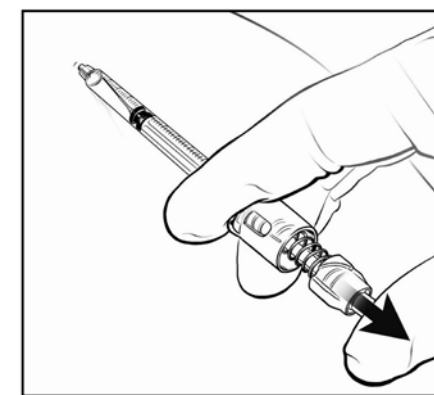

V. Regolando la pressione di pollice e dito sullo stantuffo.
VI. Dopo l'uso, gettare in un contenitore approvato preposto allo smaltimento di oggetti da taglio.

UNILIFE  TM
medical solutions

Unilife Medical Solutions è uno sviluppatore e fornitore certificato ISO 13485 di dispositivi innovativi per la sicurezza.

Per le istruzioni complete per l'uso, potete visitare www.unitract.com