

Tuberculin  
1,0 mL

Deutsch




UNITRACT<sup>®</sup>  
Passive Sharps Protection

## 1 ml Tuberkulinspritzen mit Nadelrückzug


### Kurzanleitung

#### Anweisungen zur Unterdrucksetzung einer Ampulle

**1** Nehmen Sie die Schutzkappe ab und ziehen Sie Luft in die Spritze auf (0,1 ml mehr als die erforderliche Dosis).

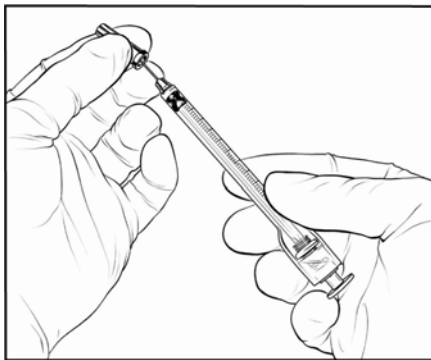


**2** A. Spritzen Sie die Luft in die Ampulle. Drücken Sie den Stempel aber nicht über die 0,1-ml-Markierung.<sup>I</sup>  
B. Ziehen Sie die erforderliche Dosis auf. Stellen Sie sicher, dass der Stempel immer bis über die 0,2-ml-Markierung gezogen wird.<sup>II</sup>

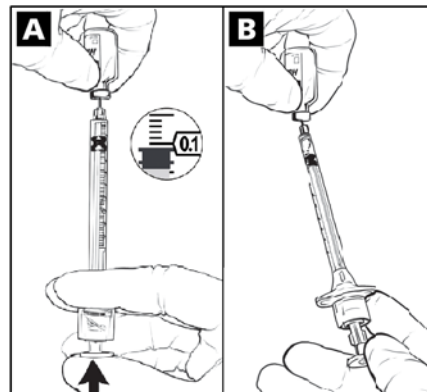

- I. Um einen vorzeitigen Nadelrückzug zu vermeiden, Stempel nicht über die 0,1-ml-Markierung hinaus herunter drücken.
- II. Um mit der Injektion zu beginnen, stellen Sie bei einer Dosis von unter 0,2 ml sicher, dass der Stempel bis über die 0,2-ml-Markierung gezogen wird.

**3** A. Verdrängen Sie überschüssige Luft oder Flüssigkeiten.  
B. Führen Sie die Nadel ein,<sup>III</sup> und drücken Sie den Stempel gegen den Nadelwiderstand vollständig herunter, um die gesamte Dosis auszutreiben.<sup>IV</sup>

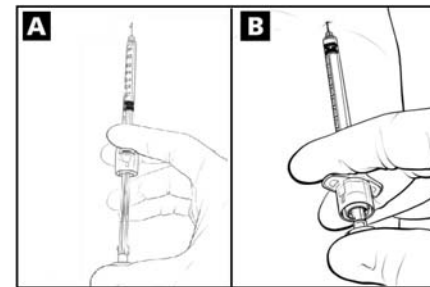

- III. Injektionen müssen nach dem vorgegebenen aseptischen Verfahren der jeweiligen Einrichtung bzw. gemäß den Anweisungen Ihres Arztes vorbereitet und verabreicht werden.
- IV. Der Benutzer sollte die Aktivierung des automa-tischen Nadelrückzugsmechanismus fühlen und hören.

**4** Der Benutzer kann die Geschwindigkeit des automatischen Nadelrückzugs<sup>V</sup> aus dem Körper direkt steuern.<sup>VI</sup>



- V. Der Stempel muss mithilfe des Drucks von Daumen und Finger bis zur Null-Markierung herunterge drückt werden.
- VI. Nach Gebrauch muss die Spritze in einem geprüften durchstichsicheren Abwurfbehälter entsorgt werden.