

Tuberculin
1,0 mL

Español



UNI TRACT  [®]TM
Passive Sharps Protection

Jeringas de tuberculina de 1 ml con aguja retráctil

Guía de consulta rápida



Instrucciones para presurizar una ampolla

1 Retire la tapa de la jeringa y aspire el aire (0,1 ml más que la dosis necesaria).


2 A. Inyecte el aire en la ampolla, pero no empuje el émbolo más allá de la marca de 0,1 ml.^I
B. Cargue la dosis necesaria, asegúrese siempre de que pone el émbolo más allá de la marca de 0,2 ml.^{II}

3 A. Expulse el aire y todo exceso de líquido.
B. Inserte la aguja^{III} y presione el émbolo para administrar la dosis completa, haciendo que la aguja pase por cualquier resistencia desde donde está introducida la aguja.^{IV}


4 El usuario puede controlar la velocidad de retracción automática de la aguja^V directamente desde el cuerpo.^{VI}

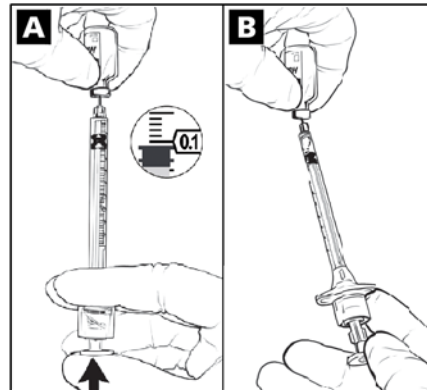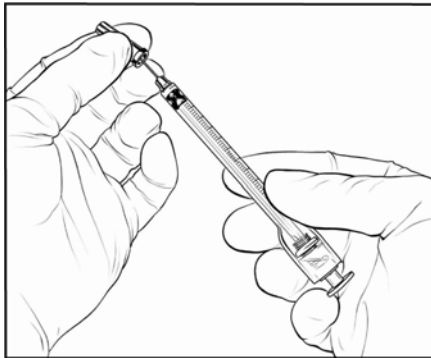

- I. Para evitar la contracción prematura de la aguja, no empuje el émbolo más allá de la marca de 0,1 ml.
- II. Para comenzar la inyección, para dosis de menos de 0,2 ml, asegúrese de que retira el émbolo más allá de la marca de 0,2 ml.

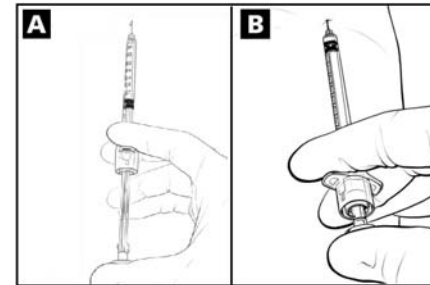

- III. Prepare y administre las inyecciones en condiciones asépticas conforme a las regulaciones institucionales o a las instrucciones de un profesional sanitario.
- IV. El usuario debe notar y oír la activación del mecanismo de retracción automática de la aguja. Siga empujando el émbolo hasta que alcance la marca de cero.

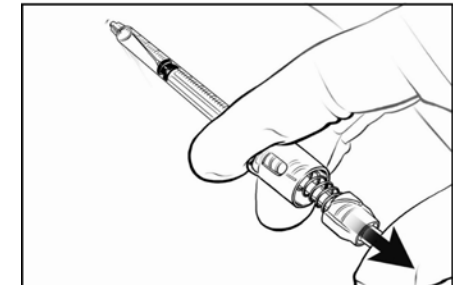

- V. Ajustando la presión que el pulgar y el dedo ejercen sobre el émbolo.
- VI. Después de usarla, deséchela en un envase para objetos afilados aprobado.

UNILIFE  TM
medical solutions

Unilife Medical Solutions es una empresa con certificación ISO 13485 que desarrolla y suministra innovadores dispositivos de seguridad.

Para obtener las instrucciones de uso completas, visite www.unitract.com

