

Tuberculin
1,0 mL

Français




UNI TRACT  [®]TM
Passive Sharps Protection


1ml seringues à tuberculine avec aiguille rétractable

Guide de référence rapide Consignes pour l'utilisation d'une cartouche ou d'une ampoule

- 1** A. Retirez le capuchon.
B. Enfoncez le piston pour expulser l'excès d'air.

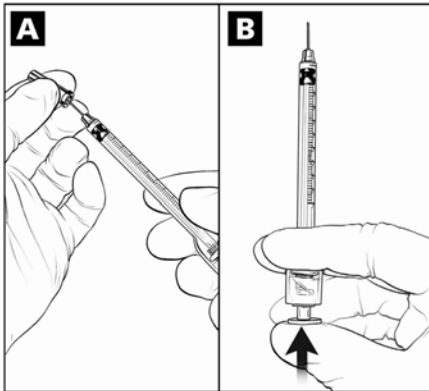


- 2** A. Aspirez la dose requise—
veuillez à toujours tirer le
piston au-delà de la marque
de 0,2 ml.^I
B. Expulsez l'excès d'air ou de
fluide.^{II}

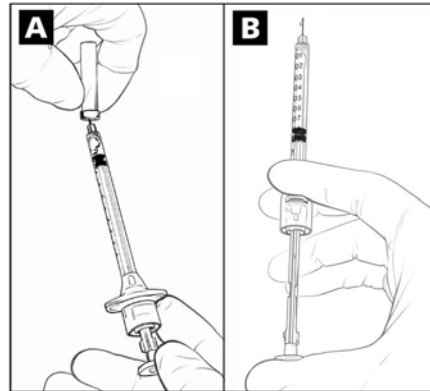


- I. Afin de déclencher l'injection, le piston doit être tiré au-delà de la marque de 0,2 ml pour les doses inférieures à 0,2 ml.
II. Préparez et administrez les injections conformément à la technique aseptique de votre établissement ou aux instructions d'un professionnel de la santé.

- 3** Introduisez l'aiguille dans le
site d'injection et appuyez à
fond sur le piston, au-delà de
toute résistance provoquée par
l'engagement de l'aiguille,
jusqu'à ce que la dose
complète ait été injectée.^{III}

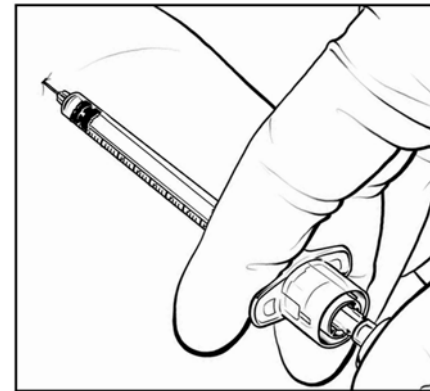

- III. Les opérateurs doivent ressentir et entendre l'enclenchement du mécanisme de rétraction automatique de l'aiguille. Une pression doit être exercée sur le piston jusqu'à ce qu'il atteigne la marque du zéro.

- 4** La vitesse de rétraction
automatique de l'aiguille peut
être contrôlée^{IV} directement à
partir du point d'injection.^V

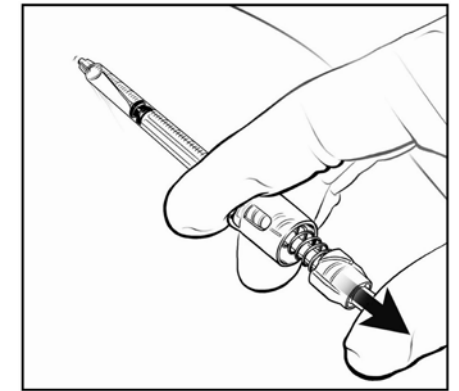

- IV. En ajustant la pression digitale sur le piston.
V. Jetez la seringue utilisée dans un réceptacle de sécurité pour objets tranchants.

