

Tuberculin  
1,0 mL

Deutsch




UNI TRACT  <sup>®TM</sup>  
Passive Sharps Protection

## 1 ml Tuberkulinspritzen mit Nadelrückzug


### Kurzanleitung

### Anweisungen zum Gebrauch der Ampulle und Kartusche

- 1** A. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.  
B. Drücken Sie den Stempel herunter, um überschüssige Luft zu verdrängen.

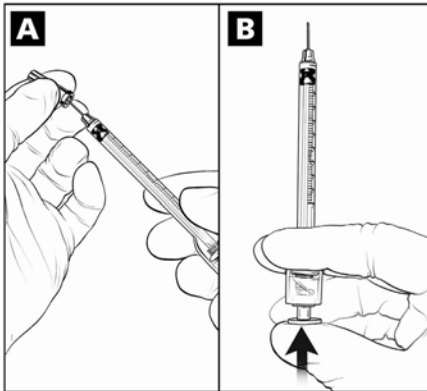


- 2** A. Ziehen Sie die erforderliche Dosis auf. Stellen Sie sicher, dass der Stempel immer bis über die 0,2-ml-Markierung gezogen wird.<sup>I</sup>  
B. Verdrängen Sie überschüssige Luft oder Flüssigkeiten.<sup>II</sup>

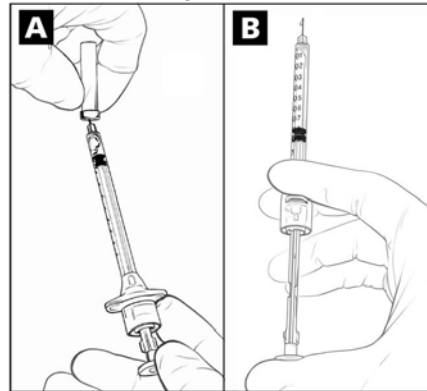


- I. Um mit der Injektion zu beginnen, stellen Sie bei einer Dosis von unter 0,2 ml sicher, dass der Stempel bis über die 0,2-ml-Markierung gezogen wird.  
II. Injektionen müssen nach dem vorgegebenen aseptischen Verfahren der jeweiligen Einrichtung bzw. gemäß den Anweisungen Ihres Arztes vorbereitet und verabreicht werden.

- 3** Führen Sie die Nadel ein, und drücken Sie den Stempel gegen den Nadelwiderstand vollständig herunter, um die gesamte Dosis auszutreiben.<sup>III</sup>

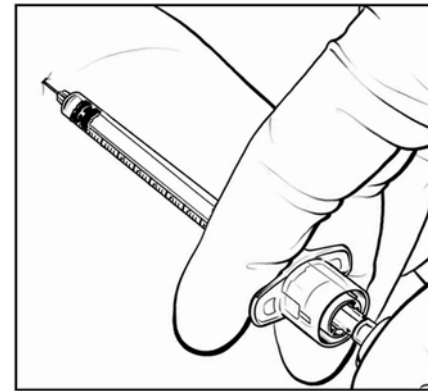

- III. Der Benutzer sollte die Aktivierung des automatischen Nadelrückzugs-mechanismus fühlen und hören.

- 4** Der Benutzer kann die Geschwindigkeit des automatischen Nadelrückzugs<sup>IV</sup> vom Körper direkt steuern.<sup>V</sup>

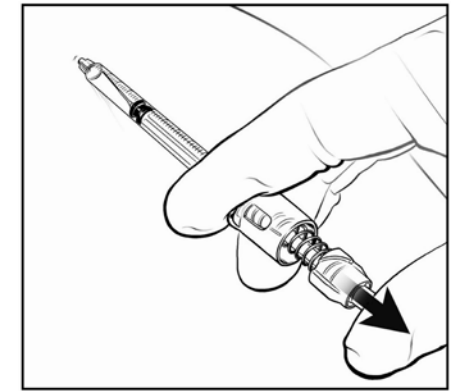

- IV. Der Stempel muss mithilfe des Drucks von Daumen und Finger bis zur Null-Markierung heruntergedrückt werden.  
V. Nach Gebrauch muss die Spritze in einem geprüften durchstichsicheren Abwurfbehälter entsorgt werden.