

Tuberculin  
1.0 mL

Español




UNI TRACT  <sup>®</sup>TM  
Passive Sharps Protection


## Jeringas de tuberculina de 1 ml con aguja retráctil

### Guía de consulta rápida Instrucciones de uso del cartucho o ampolla

- 1** A. Retire la tapa de la jeringa.  
B. Empuje el émbolo para expulsar el exceso de aire de la jeringa.

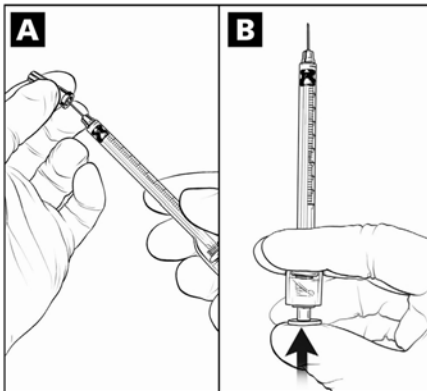


- 2** A. Cargue la dosis necesaria, asegúrese siempre de que pone el émbolo más allá de la marca de 0,2 ml.<sup>I</sup>  
B. Expulse todo exceso de aire o de líquido.<sup>II</sup>

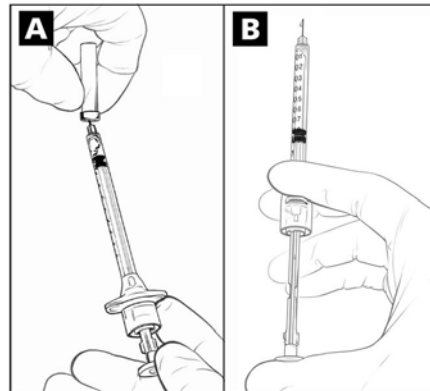


- I. Para comenzar la inyección, para dosis de menos de 0,2 ml, asegúrese de que retira el émbolo más allá de la marca de 0,2 ml.  
II. Prepare y administre las inyecciones en condiciones asépticas conforme a las regulaciones institucionales o a las instrucciones de un profesional sanitario.

- 3** Inserte la aguja y presione el émbolo para administrar la dosis completa, haciendo que la aguja pase por cualquier resistencia desde donde está introducida la aguja.<sup>III</sup>

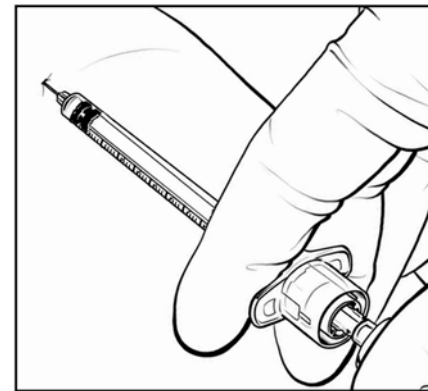

- III. El usuario debe notar y oír la activación del mecanismo de retracción automática de la aguja. Siga empujando el émbolo hasta que alcance la marca de cero.

- 4** El usuario puede controlar la velocidad de retracción automática de la aguja<sup>IV</sup> directamente desde el cuerpo.<sup>V</sup>

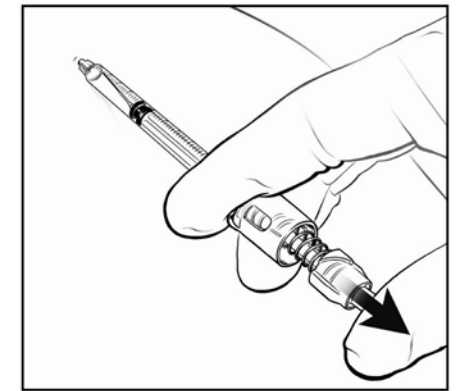

- IV. Ajustando la presión que el pulgar y el dedo ejercen sobre el émbolo.  
V. Después de usarla, deséchela en un envase para objetos afilados aprobado.

