

Safe
1.0 mL

Français




UNITRACT[®]

Passive Sharps Protection

Seringues de sécurité 1 ml avec aiguille rétractable


Guide de référence rapide Consignes d'utilisation

- 1** A. Retirez le capuchon.^I
B. Enfoncez le piston pour expulser l'excès d'air.

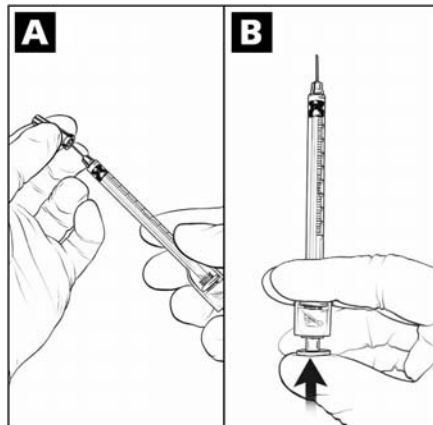


I. Préparez et administrez les injections conformément à la technique aseptique recommandée par un professionnel de la santé ou par un programme d'échange de seringues.

- 2** A. Aspirez la dose requise.
B. Veuillez à toujours tirer le piston au-delà de la marque de 0,8 ml.^{II}

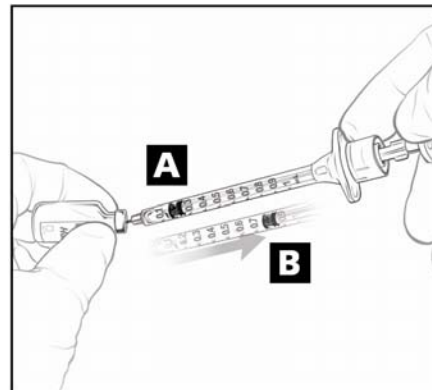

II. Afin de déclencher l'injection, le piston doit être tiré au-delà de la marque de 0,8 ml pour les doses inférieures à 0,8 ml.


- 3** A. Expulsez l'excès d'air ou de fluide.
B. Introduisez l'aiguille dans le site d'injection et appuyez à fond sur le piston,^{III} au-delà de toute résistance provoquée par l'engagement de l'aiguille, jusqu'à ce que la dose complète ait été injectée.^{IV}

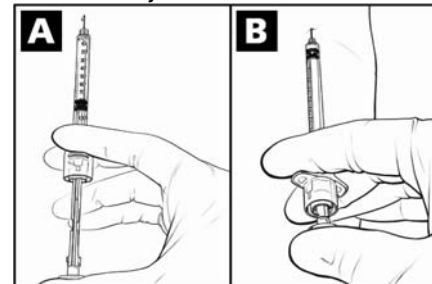

III. Cette seringue possède un système de non-réutilisation à portes. Lorsque le piston est enfoncé au-delà de la marque de 0,5 ml, la seringue ne peut plus être remplie, ce qui empêche sa réutilisation. Une aspiration ou un retour sanguin est néanmoins possible entre chaque porte de non réutilisation.

IV. Les opérateurs doivent ressentir et entendre l'enclenchement du mécanisme de rétraction automatique de l'aiguille. Une pression doit être exercée sur le piston jusqu'à ce qu'il atteigne la marque du zéro.

- 4** A. La vitesse de rétraction de l'aiguille peut être contrôlée directement à partir du site d'injection.^V
B. Jetez la seringue en toute sécurité.^{VI}

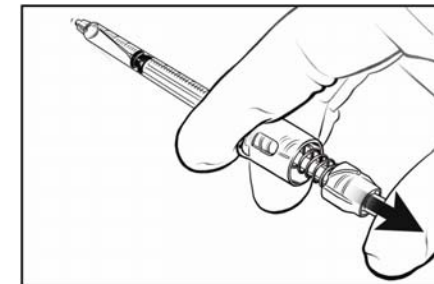

V. En ajustant la pression digitale sur le piston.
VI. Jetez la seringue utilisée dans un récipient de sécurité pour objets tranchants ou rapportez-la à un programme d'échange de seringues.