

Safe
1.0 mL

Deutsch




UNITRACT[®]
Passive Sharps Protection

1 ml Safe Syringes mit Nadelrückzug


Kurzanleitung Gebrauchsanweisung

- 1** A. Nadelkappe abnehmen.^I
B. Stempel herunterdrücken, um überschüssige Luft zu verdrängen.

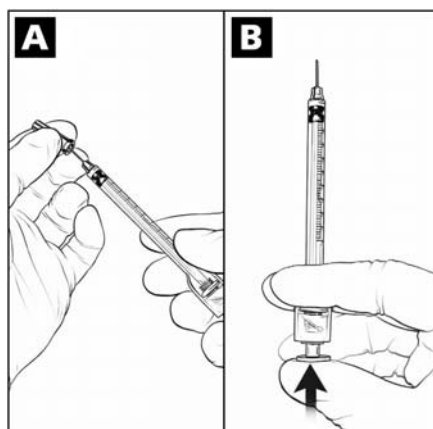


I. Injektionen müssen nach dem vorgegebenen aseptischen Verfahren gemäß den Anweisungen Ihres Arztes bzw. entsprechend einem Spritzenaustauschprogramm vorbereitet und verabreicht werden.

- 2** A. Ziehen Sie die erforderliche Dosis auf.
B. Ziehen Sie den Stempel über die 0,8-ml-Markierung auf.^{II}

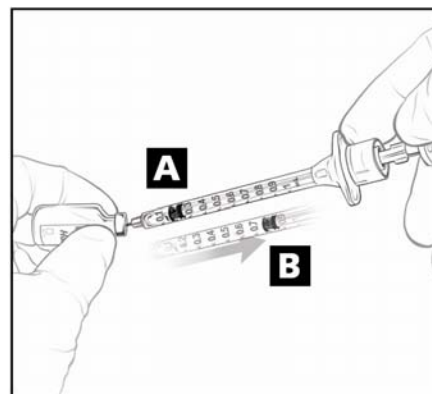


II. Um mit der Injektion zu beginnen, stellen Sie bei einer Dosis von unter 0,8 ml sicher, dass der Stempel bis über die 0,8-ml-Markierung gezogen wird.

- 3** A. Verdrängen Sie überschüssige Luft oder Flüssigkeiten.
B. Führen Sie die Nadel in die Injektionsstelle ein und drücken Sie den Stempel gegen den Widerstand herunter,^{III} bis die gesamte Dosis ausgetrieben wurde.^{IV}

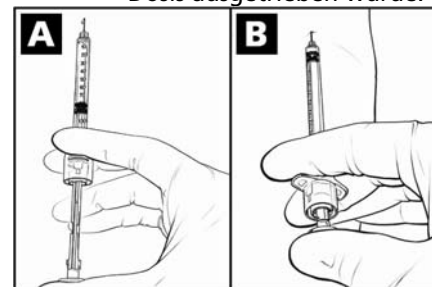

III. Die Spritze ist mit einer Vorrichtung ausgestattet, die erneute Benutzung verhindert. Wenn der Stempel über die 0,5-ml-Markierung heruntergedrückt ist, kann die Spritze nicht erneut aufgezogen werden. Eine Aspiration und Reaspiration zwischen jeder Vorrichtung ist aber möglich.
IV. Der Benutzer sollte die Aktivierung des automatischen Nadelrückzugsmechanismus fühlen und hören. Der Stempel muss bis zur Null-Markierung heruntergedrückt werden.

- 4** A. Der Benutzer kann die Geschwindigkeit des Nadelrückzugs aus dem Körper direkt steuern.^V
B. Entsorgen Sie die Spritze vorschriftsgemäß.^{VI}

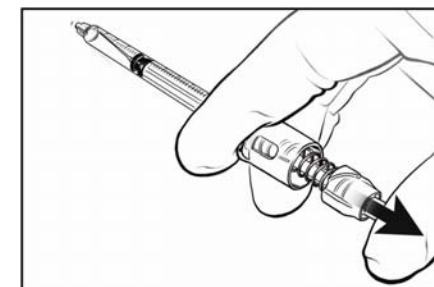

V. Verwenden Sie dazu den Druck von Finger und Daumen.
VI. Die Spritze muss nach Gebrauch in einem geprüften durchstichsicheren Abwurfbehälter entsorgt oder in eine Nadelaustauscheinrichtung abgeliefert werden.