

Safe
1.0 mL

Italiano




UNITRACT[®]
Passive Sharps Protection

Siringhe sicure da 1 ml con ago retrattile


Guida rapida di consultazione Istruzioni per l'uso

- 1** A. Togliere il tappo.^I
B. Premere lo stantuffo in modo da eliminare l'aria in eccesso.

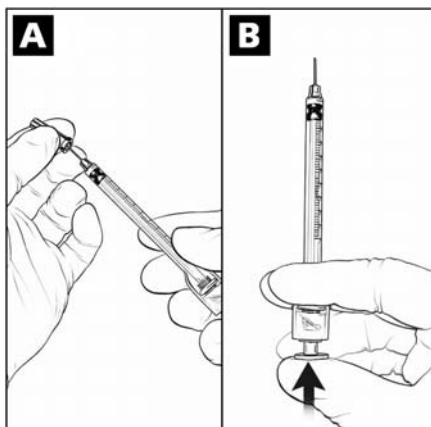


I. Preparare e praticare sempre le iniezioni utilizzando la tecnica asettica prescritta da un operatore sanitario o dal programma di scambio delle siringhe.

- 2** A. Attingere la dose richiesta.
B. Ritrarre lo stantuffo fino a superare la tacca degli 0,8 ml.^{II}

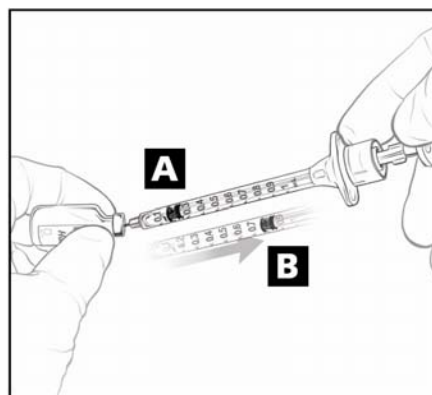


II. Per avviare l'iniezione—per dosi di meno di 0,8 ml, assicurarsi che lo stantuffo sia retratto oltre la tacca degli 0,8 ml.

- 3** A. Espellere l'eventuale aria o fluido in eccesso.
B. Inserire l'ago e iniettare l'intera dose premendo fino in fondo lo stantuffo,^{III} superando la resistenza dovuta all'innesto dell'ago.^{IV}

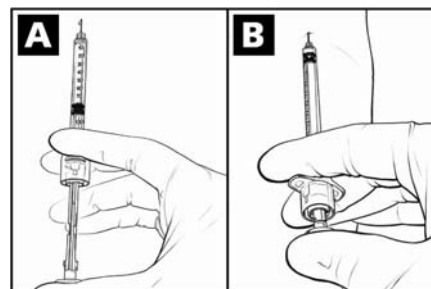

- III. Questa siringa è dotata di un dispositivo con cancelletti che ne impedisce il riutilizzo. Una volta che lo stantuffo viene spinto oltre il livello degli 0,5 ml, la siringa non può essere ricaricata, sebbene aspirazione e comparsa di sangue siano possibili tra i cancelletti.
IV. Gli operatori dovrebbero avvertire e udire l'attivazione del meccanismo automatico di ritrazione. Lo stantuffo va spinto finché raggiunge la tacca dello zero.

- 4** A. Gli operatori hanno la possibilità di controllare la rapidità della ritrazione automatica dell'ago direttamente dal corpo.^V
B. Smaltire la siringa in modo sicuro.^{VI}

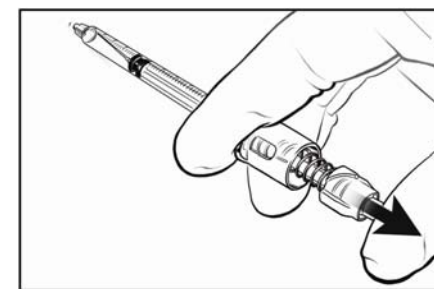

- V. Regolando la pressione di pollice e dito sullo stantuffo.
VI. Dopo l'uso, gettare in un contenitore approvato preposto allo smaltimento di oggetti da taglio o restituire alla struttura di scambio delle siringhe.

UNILIFE[™]
medical solutions

Unilife Medical Solutions è uno sviluppatore e fornitore certificato ISO 13485 di dispositivi innovativi per la sicurezza.

Per le istruzioni complete per l'uso, potete visitare www.unitract.com.

10-9859 Rev. 01